

# Liste de contrôle pour les patients passant une IRM

## Lorsqu'un médecin prescrit un examen d'IRM :

- ✓ Informez le médecin ayant prescrit l'examen d'IRM que vous portez un système de neurostimulation médullaire implantable.
- ✓ Veuillez avoir votre carte de porteur d'implant et votre télécommande à portée de main. Appelez votre équipe de soins Nevro HFX si vous n'avez pas votre carte de porteur d'implant.
- ✓ **Les patients porteurs d'un implant HFX doivent systématiquement subir une vérification de l'impédance avant de passer une IRM.** Veuillez à contacter votre équipe de soins Nevro HFX avant de programmer l'examen d'IRM. Votre technicien(ne) en radiologie et l'équipe de soins Nevro HFX confirmeront les résultats avant de procéder à l'IRM.

## Lorsque vous prenez rendez-vous pour un examen d'IRM :

- ✓ Veuillez fournir les informations suivantes à l'établissement d'IRM lors de la prise de rendez-vous :
  - La présence de votre neurostimulateur médullaire implanté HFX de Nevro
  - La présence de tout autre dispositif médical implanté, le cas échéant
  - Une description détaillée de votre dispositif, notamment le numéro de produit, les électrodes et tout autre composant implanté (ces informations sont indiquées sur votre carte de porteur d'implant)
  - Les coordonnées du médecin qui a implanté votre dispositif
  - Les directives relatives à l'IRM qui se trouvent sur le site [www.Nevro.com/Manuals](http://www.Nevro.com/Manuals)
- ✓ Votre médecin et technicien(ne) en radiologie détermineront si vous pouvez passer une IRM en toute sécurité, en fonction de ces informations.



PTRC1000




PTRC2300



PTRC2500



PTRC3000

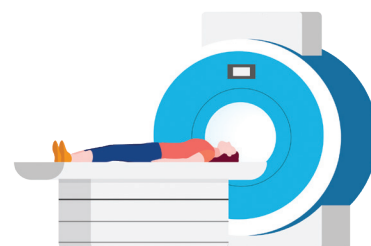


**Vérifiez que votre dispositif est en pleine charge avant de passer l'examen d'IRM.**

À l'intention des patients porteurs d'un implant muni d'une télécommande

# Liste de contrôle pour les patients passant une IRM

## Préparation à l'examen d'IRM :

- ✓ Contactez votre équipe de soins Nevro HFX pour confirmer que vous pouvez planifier en toute sécurité l'examen IRM.
- ✓ Apportez votre carte de porteur d'implant et la télécommande lors de votre rendez-vous.
- ✓ Veillez à recharger votre IPG et désactiver la stimulation avant l'examen d'IRM. Vous pouvez désactiver la stimulation à l'aide de votre télécommande.
- ✓ Après l'examen d'IRM, réactivez votre système à l'aide de votre télécommande, puis contactez votre médecin ou équipe de soins Nevro HFX pour vous assurer que votre dispositif est programmé selon les paramètres pré-IRM.

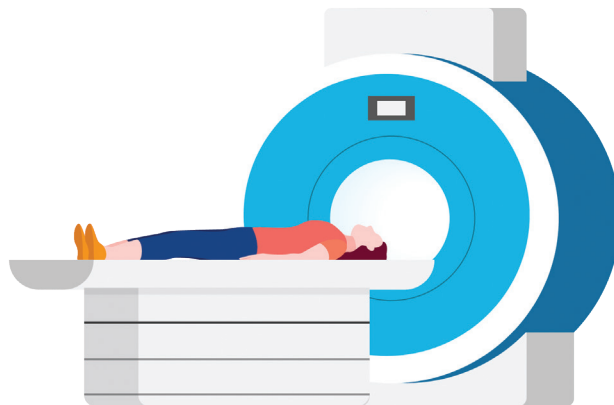

### Besoin d'aide ?

Veillez contacter votre équipe de soins HFX locale, qui vous aidera à trouver un centre compatible avec les neurostimulateurs médullaires, à recueillir les informations nécessaires, et qui pourra répondre à vos questions.



### Directives d'IRM à l'intention de votre technicien(ne) en radiologie

Scannez le code pour des informations détaillées sur la compatibilité avec l'IRM ou visitez le site [Nevro.com/manuals](https://www.nevro.com/manuals).

Remarque : HFX et HFX iQ sont compatibles avec les examens d'IRM sous certaines conditions. Les conditions autorisées pour les examens d'IRM sont différentes selon les modèles de dispositifs implantés, y compris les types d'électrodes. Avant de passer une IRM, veuillez consulter attentivement les directives HFX de Nevro relatives à l'IRM avec vos médecin, technicien(ne) en radiologie et équipe de soins Nevro HFX.

SENZA, SENZA II, SENZA OMNIA, OMNIA, HF10, le logo HF10, 10 kHz Therapy, HFX, le logo HFX, HFX iQ, HFX Algorithm, HFX CONNECT, le logo HFX Connect, HFX COACH, le logo HFX Coach, HFX CLOUD, le logo HFX Cloud, RELIEF MULTIPLIED, le logo X, NEVRO et le logo NEVRO sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nevro Corp. ©2024 Nevro Corp. Tous droits réservés.