

# MRT-Checkliste für Patienten

## Falls ein Arzt eine MRT-Untersuchung bei Ihnen anordnet, stellen Sie bitte folgende Punkte sicher:

- ✓ Informieren Sie den Arzt, der die MRT-Untersuchung angeordnet hat, dass bei Ihnen ein Rückenmarkstimulationssystem implantiert ist.
- ✓ Suchen Sie Ihren Implantatausweis. Wenn er verloren gegangen ist, wenden Sie sich an Ihr Nevro HFX-Therapieteam, um Ersatz anzufordern.
- ✓ Vor der MRT-Untersuchung muss bei allen Patienten, bei denen ein HFX Gerät implantiert wurde, zunächst eine Impedanzprüfung vorgenommen werden. Bitte wenden Sie sich rechtzeitig vor Ihrem MRT-Termin an Ihren HFX-Ansprechpartner, um das weitere Vorgehen abzusprechen. Der Radiologe/Röntgenassistent und das Nevro HFX Care Team werden die Ergebnisse vor Ihrem MRT bestätigen.

## Vereinbarung Ihres MRT-Termins:

- ✓ Bringen Sie Ihren Patientenausweis und Ihre Fernbedienung zum MRT-Termin mit. Wenn Sie Ihren Patientenausweis nicht verfügbar haben, wenden Sie sich bitte an Ihr Nevro HFX-Therapieteam.
- ✓ Stellen Sie bei der Vereinbarung eines MRT-Termins dem MRT-Zentrum und beim Termin dem Radiologen die nachstehenden Informationen bereit:
  - Dass Sie einen implantierten HFX Rückenmarksstimulator von Nevro haben
  - Ob bei Ihnen eventuell ein anderes Medizinprodukt implantiert wurde
  - Eine ausführliche Beschreibung Ihres HFX Systems einschließlich Produktnummer, Elektroden und sonstiger Komponenten des Implantats (diese Informationen finden Sie auf Ihrem Implantatausweis)
  - Die Kontaktdaten des Arztes, der Ihr Gerät implantiert hat
  - Die MRT-Leitlinien von Nevro (unter [www.Nevro.com/Manuals](http://www.Nevro.com/Manuals) abrufbar)
- ✓ **Ihr Arzt und der Radiologe/Radiologische Assistent bestimmen anhand dieser Informationen, ob eine MRT-Untersuchung bei Ihnen sicher durchgeführt werden kann.**



PTRC1000




PTRC2300



PTRC2500



PTRC3000

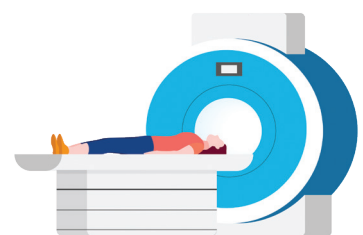


**Stellen Sie sicher, dass Ihr HFX-Gerät vor der MRT-Untersuchung vollständig aufgeladen ist.**

Für implantierte Patienten, die die Fernbedienung benutzen

# MRT-Checkliste für Patienten

## Vorbereitung auf Ihren MRT-Termin:

- ✓ Wenden Sie sich bitte an Ihr Nevro HFX-Therapieteam, um zu klären, ob Sie die MRT-Untersuchung ohne Bedenken durchführen lassen können.
- ✓ Bringen Sie Ihren Patientenausweis und Ihre Fernbedienung zum MRT-Termin mit.
- ✓ Vergewissern Sie sich vor der MRT-Untersuchung, dass Ihr IPG aufgeladen und die Stimulation ausgeschaltet ist. Sie können die Stimulation mit Ihrer Fernbedienung ausschalten.
- ✓ Schalten Sie das System nach erfolgter MRT-Untersuchung wieder mit Ihrer Fernbedienung ein. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt oder Nevro HFX-Ansprechpartner bestätigen, dass die vor der MRT-Untersuchung im Gerät programmierten Einstellungen wieder aktiviert sind.

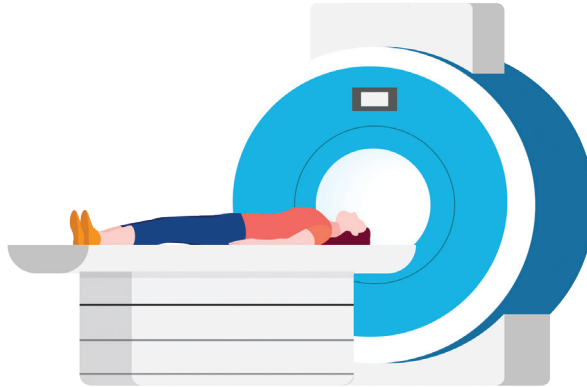

### Sie benötigen Hilfe?

Bitte kontaktieren Sie Ihr Nevro HFX-Therapieteam.



### MRT-Leitlinien für den MT-R/Radiologen

Scannen Sie den Code zum Aufrufen ausführlicher Informationen zur MRT-Kompatibilität oder besuchen Sie [Nevro.com/manuals](https://www.nevro.com/manuals).

Hinweis: Unterschiedliche Implantatmodelle, einschließlich Elektrodentypen, sind mit verschiedenen zulässigen Scan-Bedingungen verknüpft. Bitte lesen Sie zusammen mit Ihrem Arzt und Radiologen/Röntgenassistenten das Nevro MRI-Richtlinienhandbuch (erhältlich unter [www.nevro.com/manuals](https://www.nevro.com/manuals)) sorgfältig durch, um detaillierte Informationen über die MRT-Sicherheit und die Bedingungen für MRT-Scans von Patienten, denen Nevro-Produkte implantiert wurden zu erhalten.

© 2024 Nevro Corp. Alle Rechte vorbehalten. SENZA, SENZA II, SENZA OMNIA, OMNIA, HF10, das HF10-Logo, 10-kHz-Therapie, HFX, das HFX-Logo, HFX iQ, das HFX iQ-Logo, HFX Algorithm, HFX CONNECT, das HFX Connect-Logo, HFX ACCESS, das HFX Access-Logo, HFX COACH, das HFX Coach-Logo, HFX CLOUD, das HFX Cloud-Logo, RELIEF MULTIPLIED, das X-Logo, NEVRO und das NEVRO-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Nevro Corp.