

# Guías de los accesorios de HFX™



**Cómo usar el dispositivo de prueba**



**Cómo usar el mando a distancia**  
*(PTRC3000/PTRC2500, mando de 5 programas)*



**Cómo usar el mando a distancia**  
*(PTRC2300, mando de 3 programas)*



**Cómo usar el mando a distancia**  
*(PTRC1000)*



**Cómo usar el cargador**  
*(CHGR2500)*




**Cómo usar el cargador**  
*(CHGR1000)*

## Cómo usar el dispositivo de prueba Para pacientes en la fase de prueba

Utilizará el mando a distancia (PTRC3000) para realizar todos los cambios en la estimulación durante su prueba.

1. Botón de encendido/apagado del mando a distancia
2. Botón de desactivación de la estimulación
3. Indicador de nivel de batería (nivel de carga del dispositivo de prueba)
4. Indicador de nivel de estimulación
5. Botón de inicio/aumento de la estimulación
6. Botón de disminución de la estimulación
7. Indicador de programa
8. Botón de selección de programa

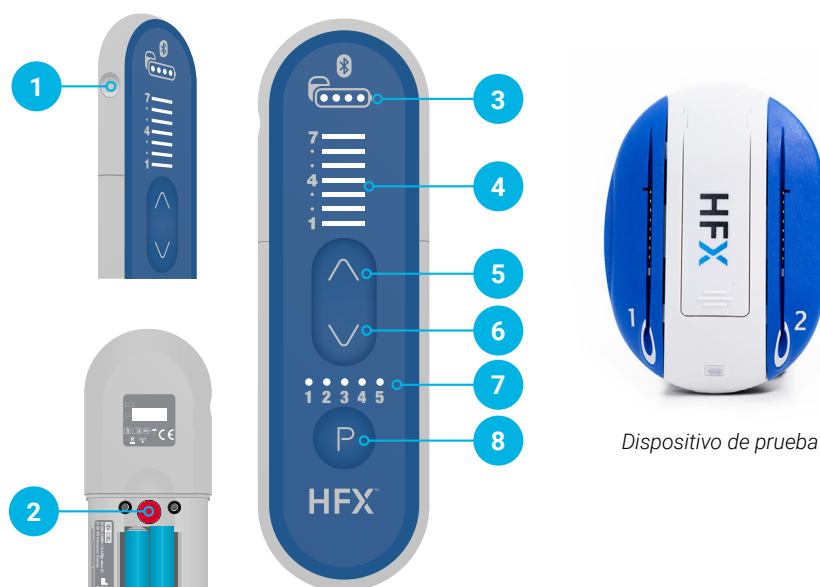

Dispositivo de prueba

### Su guía del dispositivo de prueba

Durante el periodo de prueba, mantenga el mando a distancia cerca del dispositivo de prueba, ya que ambos se comunicarán y el mando pitará repetidas veces si hay un electrodo abierto.

- El dispositivo de prueba estimula los electrodos.
- Todos los cambios en la estimulación se hacen con el mando a distancia.
- Asegúrese de mantener seco el dispositivo de prueba.
- Evite interactuar directamente con el dispositivo de prueba (p. ej., tocándolo o aplicándole presión), ya que podría provocar que se separe del cuerpo.
- Compruebe el indicador luminoso del nivel de estimulación del mando a distancia dos veces al día para confirmar que la estimulación esté activada.

### Encender el mando a distancia

Mantenga pulsado el botón lateral ● hasta que escuche un pitido largo.

- Puede que deba mantenerlo pulsado ● hasta 5 segundos.
- Si el mando a distancia se sincroniza con el dispositivo de prueba, se iluminará al menos un indicador LED en el mando a distancia.
- Si el mando a distancia no puede sincronizarse con el dispositivo de prueba, se oirán 3 pitidos y las luces del mando a distancia se apagarán.
- Repita estos pasos hasta que se establezca el enlace con el dispositivo de prueba. Será útil acercar el mando a distancia al dispositivo de prueba.
- Los demás botones del mando a distancia solo responderán cuando el mando a distancia esté encendido y vinculado con un dispositivo de prueba.


### Apagar el mando a distancia

Pulse el botón lateral ● para apagar el mando a distancia.


- La estimulación continúa incluso cuando el mando a distancia está apagado.
- El mando a distancia se apagará por sí solo si permanece inactivo 2 minutos.

## Activar la estimulación y cambiar el programa

Para activar la estimulación, cerciőrese de que el mando a distancia est3 encendido.


- La estimulaci3n est3 activa, a menos que se haya desactivado.
- Si el indicador del nivel de estimulaci3n no est3 iluminado, significa que la estimulaci3n se encuentra desactivada. Pulse  una vez para activar la estimulaci3n al nivel predeterminado.
- Cuando se activa la estimulaci3n (despu3s de haberla desactivado), el dispositivo de prueba se encontrar3 en el nivel inicial del 3ltimo programa activo usado.


Para cambiar el programa, pulse el bot3n de selecci3n de programa .



- Pulse  varias veces hasta que el indicador luminoso se sit3e en el n3mero del programa deseado.
- Una vez seleccionado el programa deseado, no pulse ning3n otro bot3n hasta que la luz deje de parpadear. El mando a distancia emitir3 1 pitido para confirmar el nuevo ajuste del programa. Verifique que el indicador luminoso sobre el n3mero de programa deseado est3 iluminado fijo.
- Si el mando a distancia emite 3 pitidos y el indicador del programa regresa al programa anterior, el programa no se cambi3 correctamente. Acerque m3s el mando a distancia al dispositivo de prueba y repita los pasos anteriores.

## Cambiar el nivel de estimulaci3n


El mando a distancia debe estar encendido antes de ajustar el nivel de estimulaci3n.


Pulse  para aumentar el nivel de estimulaci3n.

Pulse  para disminuir el nivel de estimulaci3n.

- Cada vez que se pulse  o , se emitir3 1 pitido.
- El nivel de estimulaci3n puede verse en el indicador del nivel de estimulaci3n.
- Cuando el nivel de estimulaci3n del programa seleccionado est3 en su nivel m3ximo o m3nimo y se intente subir o bajar un nivel, sonar3n 2 pitidos para indicar que se ha alcanzado el l3mite actualmente programado.

## Desactivar la estimulaci3n

Una vez que el mando a distancia est3 encendido, pulse el bot3n  debajo de la puerta de la bater3a para desactivar la estimulaci3n.

- Cuando se desactive la estimulaci3n, se apagar3n las luces del indicador del nivel de estimulaci3n.
- El bot3n  solo desactiva la estimulaci3n. No activa la estimulaci3n.

## Cambiar las pilas o bater3a



Cambie las pilas del mando a distancia si se da alguna de estas situaciones:

- El mando a distancia emite 6 pitidos al encenderlo.
- El mando a distancia no se enciende.

El mando a distancia utiliza 2 pilas AAA (deben ser alcalinas). NO UTILICE pilas de litio o recargables.

Cuando el indicador de nivel de bater3a muestra 2 puntos o menos, la bater3a del dispositivo de prueba est3 baja de carga.


Si el mando a distancia pita 10 veces al encenderlo, la bater3a del dispositivo de prueba est3 agotada y se ha desactivado la estimulaci3n. Pida cita a su m3dico para que le cambie la bater3a.

Si oye	Si ve	Significa esto	Qué hacer
Pitidos continuos durante 60 segundos	<p>Todos los indicadores luminosos de nivel de estimulación parpadean.</p> 	Puede que haya una conexión suelta entre un cable y el dispositivo de prueba.	<p>Para anular los pitidos y las luces parpadeantes, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta cinco segundos.</p> <p>Contacte con su médico.</p>
Pitidos continuos durante 60 segundos	<p>Todas las luces de nivel de carga de la batería parpadean.</p> 	La batería del dispositivo de prueba tiene un nivel bajo de carga o está agotada.	<p>Para anular los pitidos, mantenga pulsado el botón de encendido/apagado hasta cinco segundos. Las luces de la batería seguirán parpadeando.</p> <p>Contacte con su médico.</p>

# Cómo usar el mando a distancia (PTRC3000/PTRC2500)

## Para pacientes en la fase de implante

1. Botón de encendido/apagado del mando a distancia
2. Botón de desactivación de la estimulación
3. Indicador de nivel de batería (nivel de carga del implante)
4. Indicadores luminosos ascendentes del nivel de estimulación
5. Botón de inicio/aumento de la estimulación
6. Botón de disminución de la estimulación
7. Indicador de programa
8. Botón de selección de programa

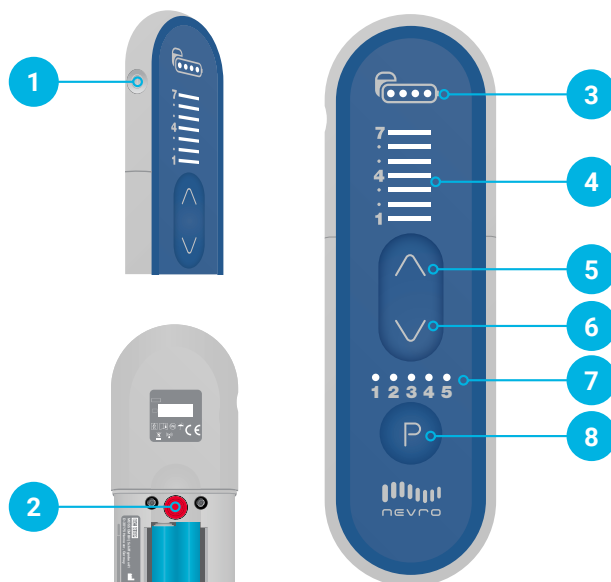

### Consejos

Cambie las pilas del mando a distancia si se da alguna de estas situaciones:

- El mando a distancia emite 6 pitidos al encenderlo.
- El mando a distancia no se enciende.
- Han pasado 3 meses desde la última vez que se cambiaron las pilas.

Para obtener un alivio óptimo, colabore estrechamente con su equipo de asistencia de Nevro HFX a fin de identificar qué programas son idóneos en su caso. El equipo le guiará sobre cómo y cuándo usar el mando a distancia.

El mando a distancia utiliza 2 pilas AAA (deben ser alcalinas).

NO UTILICE pilas de litio o recargables.

Cuando el indicador de nivel de batería muestre 2 puntos o menos, quiere decir que hay que recargar el implante con el cargador.

Encontrará instrucciones en vídeo en [www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/](http://www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/).

### Encender el mando a distancia

Mantenga pulsado el botón lateral ● hasta que escuche un pitido largo.

- Puede que deba mantenerlo pulsado ● hasta 5 segundos.
- Si el mando a distancia se sincroniza con el implante, se iluminará al menos un indicador LED en el mando a distancia.
- Si el mando a distancia no puede sincronizarse con el implante, se oirán 3 pitidos y se apagarán los indicadores luminosos del mando a distancia.
- Repita estos pasos hasta que se establezca un enlace con el implante. A veces, hay que acercar el mando a distancia al implante.
- Los demás botones del mando a distancia solo responderán cuando el mando a distancia esté encendido y enlazado con el implante.


### Apagar el mando a distancia

Pulse el botón lateral ● para apagar el mando a distancia.


- La estimulación continúa incluso cuando el mando a distancia está apagado.
- El mando a distancia se apagará por sí solo si permanece inactivo 2 minutos.

## Activar la estimulación y cambiar el programa

Para activar la estimulación, cerciőrese de que el mando a distancia est3 encendido.


- La estimulaci3n est3 activa, a menos que se haya desactivado.
- Si el indicador del nivel de estimulaci3n no est3 iluminado, significa que la estimulaci3n se encuentra desactivada. Pulse  una vez para activar la estimulaci3n hasta el nivel predeterminado.
- Cuando se active la estimulaci3n (despu3s de haberla desactivado), el implante se situar3 en el nivel de inicio del 3ltimo programa activo utilizado.


Para cambiar el programa, pulse el bot3n de selecci3n de programa .



- Pulse  varias veces hasta que el indicador luminoso se sit3e en el n3mero del programa deseado.
- Una vez seleccionado el programa deseado, no pulse ning3n otro bot3n hasta que la luz deje de parpadear. El mando a distancia emitir3 1 pitido para confirmar el nuevo ajuste del programa. Verifique que el indicador luminoso sobre el n3mero de programa deseado est3 iluminado fijo.
- Si el mando a distancia emite 3 pitidos y el indicador del programa regresa al programa anterior, el programa no se cambi3 correctamente. Acerque m3s el mando a distancia al implante y repita los pasos anteriores.

## Cambiar el nivel de estimulaci3n

El mando a distancia debe estar encendido antes de ajustar el nivel de estimulaci3n.






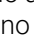
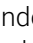
Pulse  para aumentar el nivel de estimulaci3n.

Pulse  para disminuir el nivel de estimulaci3n.


- Cada vez que se pulse  o , se emitir3 1 pitido.
- El nivel de estimulaci3n puede verse en el indicador del nivel de estimulaci3n.
- Cuando el nivel de estimulaci3n del programa seleccionado est3 en su nivel m3ximo o m3nimo Y se intente subir o bajar un nivel, sonar3n 2 pitidos para indicar que se ha alcanzado el l3mite actualmente programado.

## C3mo cambiar entre grupos


P3ngase en contacto con el equipo de asistencia de Nevro HFX antes de acceder a estos ajustes en su mando a distancia.


- Para entrar en el modo de cambio de grupo, mantenga pulsado  durante al menos 3 segundos. Se iluminar3 una luz de forma intermitente por encima de  para indicar el n3mero de grupo en el que se encuentra actualmente. Use  o  para desplazarse al n3mero de grupo deseado.
- Para confirmar el cambio al grupo nuevo, vuelva a mantener pulsado  durante al menos 3 segundos. Se oir3 un pitido largo que confirma la aplicaci3n del cambio. El mando a distancia saldr3 del modo de cambio de grupo autom3ticamente. Si no confirma el cambio del n3mero de grupo en menos de 60 segundos, los cambios no se guardar3n.
- El mando a distancia mostrar3 el n3mero de grupo en el que se encuentra actualmente siempre que cambie el programa. Para activar un cambio de programa, pulse  una vez. A continuaci3n, ver3 el n3mero de un nivel iluminado para indicar su n3mero de grupo actual. Pulse  otra vez para pasar al siguiente programa.

**Ejemplo: El mando a distancia muestra el grupo 1, programa 1**

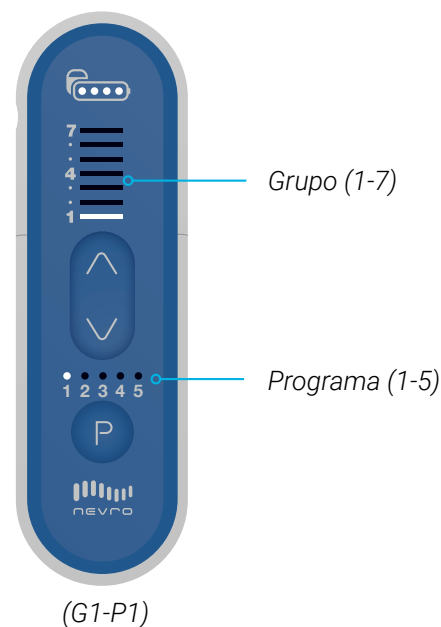

## Desactivar la estimulaci3n


Una vez que el mando a distancia est3 encendido, pulse el bot3n  debajo de la puerta de la bater3a para desactivar la estimulaci3n.

- Cuando se desactive la estimulaci3n, se apagar3n las luces del indicador del nivel de estimulaci3n.
- El bot3n  solo desactiva la estimulaci3n. No activa la estimulaci3n.

# Cómo usar el mando a distancia (PTRC2300)

## Para pacientes en la fase de implante

1. Botón de encendido/apagado del mando a distancia
2. Botón de desactivación de la estimulación
3. Indicador de nivel de batería (nivel de carga del implante)
4. Indicadores luminosos ascendentes del nivel de estimulación
5. Botón de inicio/aumento de la estimulación
6. Botón de disminución de la estimulación
7. Indicador de programa
8. Botón de selección de programa

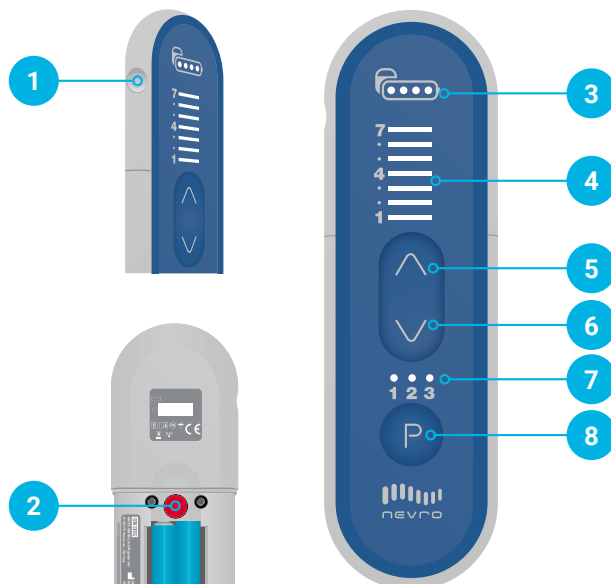

### Consejos

Cambie las pilas del mando a distancia si se da alguna de estas situaciones:

- El mando a distancia emite 6 pitidos al encenderlo.
- El mando a distancia no se enciende.
- Han pasado 3 meses desde la última vez que se cambiaron las pilas.

Para obtener un alivio óptimo, colabore estrechamente con su equipo de asistencia de Nevro HFX a fin de identificar qué programas son idóneos en su caso. El equipo le guiará sobre cómo y cuándo usar el mando a distancia.

El mando a distancia utiliza 2 pilas AAA (deben ser alcalinas).


NO UTILICE pilas de litio o recargables.

Cuando el indicador de nivel de batería muestre 2 puntos o menos, quiere decir que hay que recargar el implante con el cargador.


Encontrará instrucciones en vídeo en [www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/](http://www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/).

### Encender el mando a distancia

Mantenga pulsado el botón lateral  hasta que escuche un pitido largo.

- Puede que deba mantenerlo pulsado  hasta 5 segundos.
- Si el mando a distancia se sincroniza con el implante, se iluminará al menos un indicador LED en el mando a distancia.
- Si el mando a distancia no puede sincronizarse con el implante, se oirán 3 pitidos y se apagarán los indicadores luminosos del mando a distancia.
- Repita estos pasos hasta que se establezca un enlace con el implante. A veces, hay que acercarse al implante.
- Los demás botones del mando a distancia solo responderán cuando el mando a distancia esté encendido y enlazado con el implante.


## Apagar el mando a distancia

Pulse el botón lateral  para apagar el mando a distancia.


- La estimulación continúa incluso cuando el mando a distancia está apagado.
- El mando a distancia se apagará por sí solo si permanece inactivo 2 minutos.

## Activar la estimulación y cambiar el programa

Para activar la estimulación, cerciórese de que el mando a distancia esté encendido.

- La estimulación está activa, a menos que se haya desactivado.
- Si el indicador del nivel de estimulación no está iluminado, significa que la estimulación se encuentra desactivada. Pulse  una vez para activar la estimulación hasta el nivel predeterminado.
- Cuando se active la estimulación (después de haberla desactivado), el implante se situará en el nivel de inicio del último programa activo utilizado.

Para cambiar el programa, pulse el botón de selección de programa .



- Pulse  varias veces hasta que el indicador luminoso se sitúe en el número del programa deseado.
- Una vez seleccionado el programa deseado, no pulse ningún otro botón hasta que la luz deje de parpadear. El mando a distancia emitirá 1 pitido para confirmar el nuevo ajuste del programa. Verifique que el indicador luminoso sobre el número de programa deseado esté iluminado fijo.
- Si el mando a distancia emite 3 pitidos y el indicador del programa regresa al programa anterior, el programa no se cambió correctamente. Acerque más el mando a distancia al implante y repita los pasos anteriores.

## Cambiar el nivel de estimulación


El mando a distancia debe estar encendido antes de ajustar el nivel de estimulación.


Pulse  para aumentar el nivel de estimulación.

Pulse  para disminuir el nivel de estimulación.

- Cada vez que se pulse  o , se emitirá 1 pitido.
- El nivel de estimulación puede verse en el indicador del nivel de estimulación.
- Cuando el nivel de estimulación del programa seleccionado esté en su nivel máximo o mínimo Y se intente subir o bajar un nivel, sonarán 2 pitidos para indicar que se ha alcanzado el límite actualmente programado.

## Desactivar la estimulación


Una vez que el mando a distancia esté encendido, pulse el botón  debajo de la puerta de la batería para desactivar la estimulación.

- Cuando se desactive la estimulación, se apagarán las luces del indicador del nivel de estimulación.
- El botón  solo desactiva la estimulación. No activa la estimulación.



# Cómo usar el mando a distancia (PTRC1000) Para pacientes en la fase de implante

1. Botón de encendido/apagado del mando a distancia
2. Indicador de nivel de estimulación
3. Indicador de programa
4. Botón de selección de programa
5. Botón de desactivación de la estimulación
6. Botón de inicio/aumento de la estimulación
7. Botón de disminución de la estimulación
8. Indicador de nivel de batería  
(nivel de carga del dispositivo de prueba o el implante)

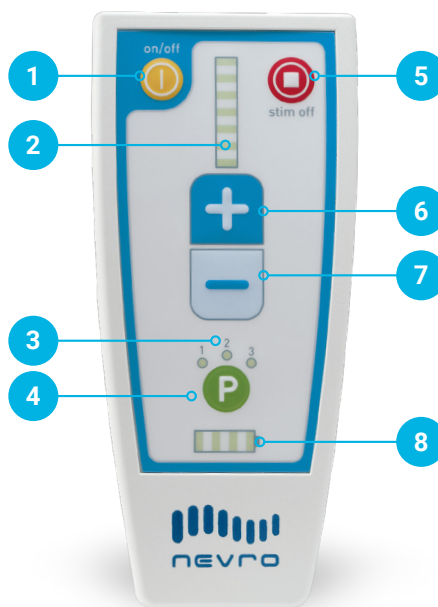

## Consejos

El equipo de asistencia de Nevro HFX le guiará para usar el mando a distancia. Es posible que no tenga que cambiar la programación durante la prueba temporal. Para obtener un alivio óptimo, colabore estrechamente con su equipo de asistencia de Nevro HFX.


Cambie las pilas del mando a distancia si se da alguna de estas situaciones:


- El mando a distancia emite 6 pitidos al encenderlo.
- El mando a distancia no se enciende.

El mando a distancia utiliza 2 pilas AA (deben ser alcalinas). NO UTILICE pilas de litio o recargables.


Cuando el indicador de nivel de batería muestra 2 barras o menos, la batería del dispositivo de prueba debe cambiarse. Consulte la guía del dispositivo de prueba.



## Encender el mando a distancia

Mantenga pulsado  hasta que se enciendan los indicadores luminosos y se oiga un pitido.

- Puede que deba mantenerlo pulsado  hasta 5 segundos.
- Si el mando a distancia se sincroniza con el dispositivo de prueba o el implante, se iluminará el indicador del programa (1, 2 o 3). El indicador de nivel de estimulación también se iluminará para señalar que la estimulación está activada.
- Si el mando a distancia no puede sincronizarse con el dispositivo de prueba o el implante, se oirán 3 pitidos y se apagarán los indicadores luminosos del mando a distancia.
- Repita estos pasos hasta que se establezca el enlace con el dispositivo de prueba o el implante. Será útil acercar el mando a distancia al dispositivo de prueba o el implante.
- Los demás botones del mando a distancia solo responderán cuando el mando a distancia esté encendido y vinculado al dispositivo de prueba o el implante.

## Apagar el mando a distancia

Pulse  para apagar el mando a distancia.

- La estimulación continúa incluso cuando el mando a distancia está apagado.
- NO PULSE  para apagar el mando a distancia.
-  desactiva la estimulación.
- El mando a distancia se apagará por sí solo si permanece inactivo 2 minutos.

## Desactivar la estimulación

Una vez que el mando a distancia esté encendido, pulse  para desactivar la estimulación.


- Cuando se desactive la estimulación, se apagarán las luces del indicador del nivel de estimulación.
- Este botón solo desactiva la estimulación. No activa la estimulación.

## Activar la estimulación y cambiar el programa

Para activar la estimulación, pulse . El mando a distancia debe estar encendido.

- La estimulación está activa, a menos que se haya desactivado.
- Cuando se active la estimulación (después de haberla desactivado), el dispositivo de prueba o el implante se encontrará en el nivel inicial del último programa activo usado.


Para cambiar el programa, pulse .

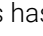

- El indicador luminoso de programa empezará a parpadear.
- Pulse  varias veces hasta que el indicador luminoso se sitúe en el número del programa deseado.
- Una vez seleccionado el programa deseado, no pulse ningún otro botón hasta que la luz deje de parpadear. El mando a distancia emitirá un pitido largo para confirmar el nuevo ajuste del programa. Verifique que el indicador luminoso sobre el número de programa deseado esté iluminado fijo.
- Si el mando a distancia emite 3 pitidos y el indicador del programa regresa al programa anterior, el programa no se cambió correctamente. Acerque más el mando a distancia al dispositivo de prueba o el implante y repita los pasos anteriores.

## Cambiar el nivel de estimulación

El mando a distancia debe estar encendido antes de ajustar el nivel de estimulación.

Pulse  para aumentar el nivel de estimulación.

Pulse  para disminuir el nivel de estimulación.

- Cada vez que se pulse  o , se emitirá 1 pitido.
- El nivel de estimulación puede verse en el indicador del nivel de estimulación.
- Cuando el nivel de estimulación del programa seleccionado esté en su nivel máximo o mínimo Y se intente subir o bajar un nivel, sonarán 2 pitidos para indicar que se ha alcanzado el límite actualmente programado.

## Cómo usar el cargador (CHGR2500) Para pacientes en la fase de implante


1. Bobina de carga
2. Puerto del adaptador de alimentación
3. Indicador de nivel de batería del cargador
4. Botón de inicio de carga
5. Indicador de intensidad de señal de la antena
6. Indicador de nivel de batería del implante



### Consejos


El tiempo de carga puede variar de una sesión a otra en función de factores tales como la frecuencia de recarga y los ajustes de estimulación.

Si la bobina de carga no establece un enlace suficiente (como muestran las luces circulares del indicador de intensidad de señal de la antena), mueva con mucho cuidado la bobina de carga y espere 3 segundos. Las luces circulares del indicador de intensidad de señal de la antena tardan a veces hasta 3 segundos en actualizar la nueva posición de la bobina de carga. Repita el procedimiento si es necesario.

Si el tiempo de carga es más breve del esperado, puede que se haya apagado el implante. Cerciérese de que el implante está encendido usando el mando a distancia. Sabrá si la estimulación está activa si ve las luces iluminadas sobre la flecha .

### Avisos importantes

Podrá recibir estimulación del implante incluso mientras se está cargando.

No cargue el implante mientras el cargador esté conectado a una toma eléctrica de pared. Retire siempre el adaptador de alimentación antes de pulsar el botón de inicio de carga . Desconecte el adaptador de alimentación de la pared cada vez que cargue el implante. Cuando termine la carga, vuelva a enchufar el cargador al adaptador de alimentación y, a continuación, el adaptador de alimentación a la pared para que el cargador esté listo para la siguiente sesión de recarga.

Recargue el implante con regularidad para adquirir una rutina fácil de recordar.

Durante la carga, es posible que note calor en la zona de implantación. Si siente dolor o alguna molestia, detenga la carga y llame a su médico o su equipo de asistencia de Nevro HFX.


Use el mando a distancia para verificar que la estimulación esté activada. Si el tiempo de carga aumenta drásticamente, informe a su médico o el equipo de asistencia de Nevro HFX.

Encontrará instrucciones en vídeo en [www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/](http://www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/).


## Preparación de la carga


Coloque el centro de la bobina circular de carga sobre la parte superior del implante.

- En la figura siguiente puede verse que la parte superior del implante (en el recuadro amarillo) queda en el centro de la bobina de carga.

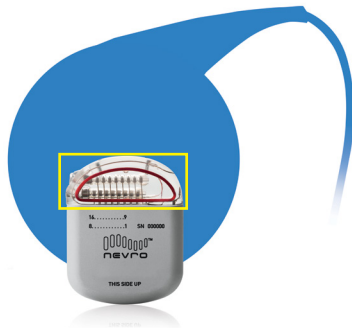

## Inicio de la carga

Pulse el botón de inicio de carga  para encender el cargador. La luz lateral del dispositivo (indicador de nivel de batería del cargador) se iluminará para confirmar que el cargador está activo. El cargador emitirá pitidos y empezará a buscar el implante.

1. Los pitidos continuarán hasta que el cargador se enlace con el implante.
2. Si transcurren 10 segundos sin establecerse un enlace, el cargador emitirá un pitido largo y se apagará. Mueva la bobina de carga y vuelva a pulsar el botón de inicio de carga .
3. Cuando aparezca al menos un círculo iluminado en el indicador de intensidad de señal de la antena, se habrá establecido el enlace. Cuantos más círculos aparezcan, mejor será la vinculación y menor la probabilidad de que la carga se interrumpa con los movimientos. Si solo se ilumina el punto central, significa que la conexión es mala y que no se enlazarán el implante y el cargador.
4. Si el cargador está en la posición adecuada, el indicador de nivel de batería del GII se iluminará.



Si el enlace no se establece, es insuficiente o desaparece, mueva con mucho cuidado la bobina azul de carga y repita los pasos anteriores.

## Carga

La carga estará en curso si se iluminan el indicador de nivel de batería del GII y los círculos del indicador de intensidad de señal de la antena. A medida que avanza la carga, aumenta el número de puntos iluminados en el indicador de nivel de batería del GII.

- Si desaparece el enlace, el cargador emitirá un pitido. Mueva la bobina de carga y repita los pasos indicados en la sección «Inicio de la carga».

## Carga completa

Cuando se haya completado la carga, sonará un pitido largo y se apagará automáticamente el cargador. El cargador no tiene ningún botón de apagado. Compruebe el nivel de batería del implante para asegurarse de que la batería está totalmente cargada (cuatro puntos).

Use el mando a distancia para comprobar que el implante esté encendido.

Enchufe el cargador a una toma eléctrica de pared para garantizar que esté listo para la próxima sesión de carga.

- Para enchufar el cargador a la toma eléctrica de pared, conecte primero el adaptador de alimentación al puerto correspondiente del cargador. Después, inserte el adaptador de alimentación en la toma eléctrica de pared. El indicador naranja indica que se está recargando el cargador. Si se apaga la luz naranja, es que la recarga se ha completado.



## Uso del cinturón del cargador


Una vez que sepa dónde debe colocar la bobina de carga para conseguir un buen enlace con el implante, utilice el cinturón del cargador para fijar la posición de la bobina de carga al cuerpo antes de la carga.

1. Coloque la bobina azul de carga en el bolsillo de malla del cinturón del cargador y abróchese bien el cinturón alrededor de la cintura. Use el cierre de velcro próximo a la bolsa para asegurar el cable de la bobina de carga.
2. Comience la carga y mueva la bobina de carga hasta que se enlace con el implante.
3. Si desea poder moverse durante la carga, introduzca el cargador en el soporte y luego sujete el soporte al cinturón o al pantalón.




## Cómo usar el cargador (CHGR1000) Para pacientes en la fase de implante

1. Bobina de carga
2. Indicador de nivel de batería del cargador
3. Indicador de intensidad de señal de la antena
4. Botón de desactivación de la estimulación
5. Botón de inicio de carga
6. Puerto del adaptador de alimentación
7. Indicador de nivel de batería del implante

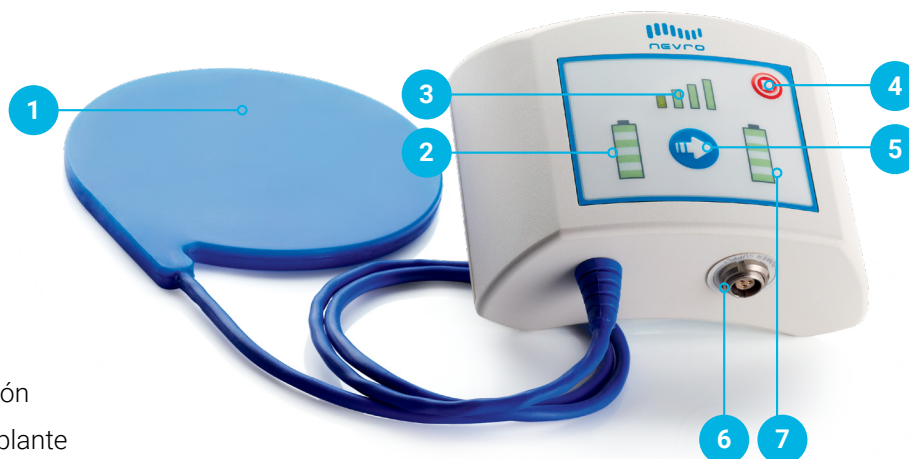

### Consejos

No pulse  a menos que quiera desactivar la estimulación. Para activar la estimulación, use el mando a distancia.

El tiempo de carga puede variar de una sesión a otra en función de factores tales como la frecuencia de recarga y los ajustes de estimulación.

Si la bobina de carga no establece un enlace suficiente (como muestra el indicador de intensidad de señal de la antena), recolóque la bobina de carga lentamente y espere 3 segundos. El indicador de intensidad de señal de la antena tarda a veces hasta 3 segundos en actualizar la nueva posición de la bobina de carga. Repita el procedimiento si es necesario.

Si el tiempo de carga es más breve del esperado, puede que se haya apagado el implante. Cerciórese de que el implante está encendido usando el mando a distancia.

### Avisos importantes

No cargue el implante mientras el cargador esté conectado a una toma eléctrica de pared. Retire siempre el adaptador de alimentación antes de pulsar el botón de inicio de carga.

Recargue el implante con regularidad para adquirir una rutina fácil de recordar.

Durante la carga, es posible que note calor en la zona de implantación. Si siente dolor o alguna molestia, detenga la carga y llame a su médico o su equipo de asistencia de Nevro HFX.

Después de recargar el implante, conecte el cargador de nuevo a una toma eléctrica de pared a fin de prepararlo para la próxima sesión de recarga.

Use el mando a distancia después de la carga para verificar que la estimulación esté activada. Si el tiempo de carga aumenta drásticamente, informe al equipo de asistencia de Nevro HFX.

Encontrará instrucciones en vídeo en [www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/](http://www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/).

## Preparación de la carga

Coloque el centro de la bobina circular de carga sobre la parte superior del implante.

- En la figura 1 se muestra la parte superior del implante (en el recuadro amarillo) en el centro de la bobina de carga.
- En la figura 2 se muestra un implante justo por debajo de la cintura. Su implante puede estar en un lugar diferente como, por ejemplo, la parte anterior del abdomen (no se muestra en la figura).

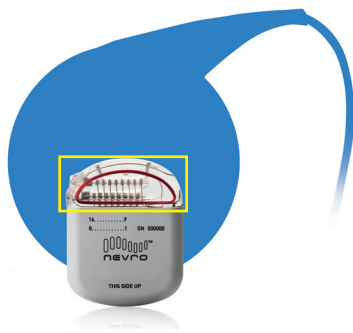


Figura 1

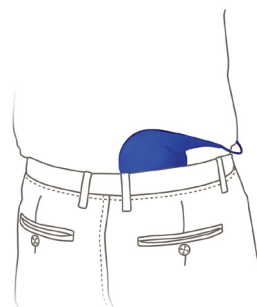



Figura 2

## Inicio de la carga

Mantenga pulsado  hasta que empiece a sonar un pitido y luego suéltelo.

1. Los pitidos y el parpadeo de los indicadores luminosos verdes continuarán hasta que el cargador se vincule con el implante.
2. Si transcurren de 10 a 12 segundos sin vinculación, el cargador emitirá un pitido largo y se apagará. Reposicione la bobina de carga y pulse  otra vez.
3. Si se encienden los indicadores luminosos de intensidad de señal de la antena, significa que se ha establecido el enlace. Cuantos más indicadores luminosos se enciendan, mejor será el enlace y menor resultará la probabilidad de que la carga se interrumpa con los movimientos.
4. Si el enlace es insuficiente o desaparece, el indicador de intensidad de señal de la antena solo mostrará la barra de color naranja y emitirá un pitido intermitente.

Si el enlace no se establece, es insuficiente o desaparece, vuelva a colocar despacio la bobina azul de carga y repita los pasos 1 y 2.

## Carga

La carga prosigue mientras parpadeen tanto el indicador de nivel de batería del cargador como el indicador de nivel de batería del implante. A medida que avance el proceso de carga, disminuirá el número de indicadores luminosos del nivel de batería del cargador y aumentará el número de indicadores luminosos del nivel de batería del implante.

- Si desaparece el enlace, el cargador emitirá un pitido. Recoloque la bobina de carga y repita los pasos 1 y 2.

## Carga completa

Cuando se haya completado la carga, sonará un pitido largo y se apagarán los indicadores luminosos del cargador. Compruebe el nivel de batería del implante para asegurarse de que la batería está totalmente cargada.

Use el mando a distancia para comprobar que el implante esté encendido.

Enchufe el cargador a una toma eléctrica de pared para garantizar que esté listo para la próxima sesión de carga.

- Para enchufar el cargador a la toma eléctrica de pared, conecte primero el adaptador de alimentación al puerto correspondiente del cargador. Después, inserte el adaptador de alimentación en la toma eléctrica de pared.
- No hay problema si el cargador se carga de forma continuada. La batería no se dañará.

## Uso del cinturón del cargador


Una vez que sepa dónde debe colocar la bobina de carga para conseguir un buen enlace con el implante, utilice el cinturón del cargador para fijar la posición de la bobina de carga al cuerpo antes de la carga.

1. Coloque la bobina azul de carga en el bolsillo de malla del cinturón del cargador y abróchese bien el cinturón alrededor de la cintura.
2. Comience la carga y mueva la bobina de carga hasta que se enlace con el implante.
3. Si desea moverse durante la carga, inserte el cargador en su soporte. A continuación, cuelgue el soporte de su cinturón o de los pantalones.

La bobina de carga puede insertarse en el bolsillo de malla a través de la abertura disponible en la parte superior del cinturón del cargador

Cinturón del cargador

Soporte del cargador

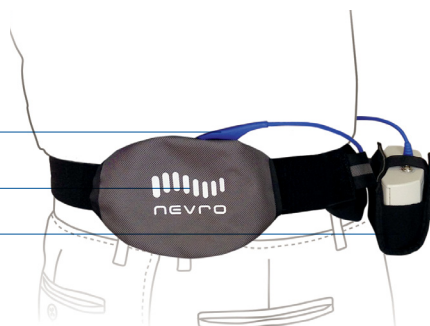

Encontrará instrucciones en vídeo en [www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/](http://www.NevroHFX.com/en/resources/remote-control/).

Para obtener instrucciones completas sobre accesorios, advertencias y precauciones, consulte el manual del paciente.

**Información importante:** Solo por prescripción facultativa. Las experiencias de los pacientes con el sistema de estimulación de la médula espinal (EME) Senza® pueden variar de una persona a otra, de la misma manera que el grado de alivio del dolor. La frecuencia de los efectos adversos asociados a la cirugía de implantación o el uso de la EME varían asimismo de un paciente a otro. Los pacientes deben consultar a su médico para entender los riesgos y beneficios del tratamiento con EME. Consulte el manual de Senza, disponible en [www.nevro.com/manuals](http://www.nevro.com/manuals), para acceder a toda la información, por ejemplo instrucciones de uso, contraindicaciones, advertencias/precauciones y efectos adversos.